




歩行器の使い方

●固定型

- 歩行器の基本形です。
- 歩行器左右のグリップをしっかり握ってご使用ください。
- ②～④の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。


- ①歩行器のグリップをしっかり握る
- ②③持ち上げて前へ出す
- ④身体を少しずつ移動する

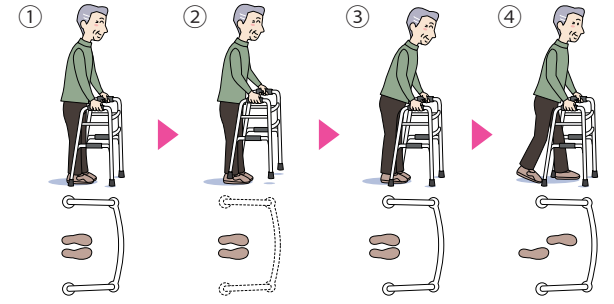

●交互式

- 左右のフレームを交互に動かして移動する歩行補助器です。
- 歩行器左右のグリップをしっかり握ってご使用ください。
- ②～⑤の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。


- ①歩行器のグリップをしっかり握る
- ②右アームの移動
- ③左足を前に出す
- ④左アームの移動
- ⑤右足を前に出す

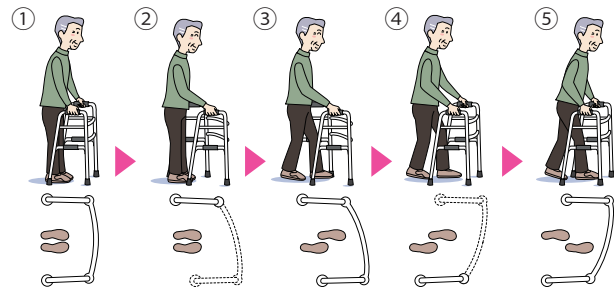

●キャスター付

- 脚にキャスターとキャスター付ストッパーの付いた歩行器です。
- 歩行器左右のグリップをしっかり握ってご使用ください。
- ②～④の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- ①歩行器のグリップをしっかり握る
- ②歩行器を前に出す
- ③歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる
- ④身体を少しずつ移動する

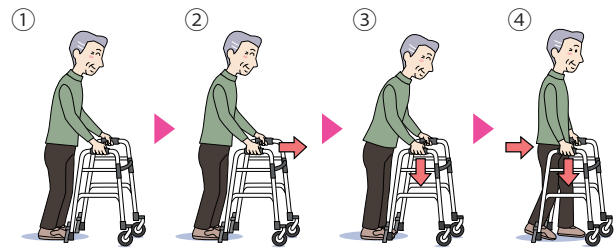

セーフティーアーム ウォーカーハイ

TAISコード 00465-000099



自重:3.0kg

レンタル価格	¥2,400
利用者負担 1割	
¥240	
2割	¥480
3割	¥720

コードNo.21681-31

セーフティーアーム ウォーカー

TAISコード 00465-000036



自重:2.8kg

レンタル価格	¥2,400
利用者負担 1割	
¥240	
2割	¥480
3割	¥720

コードNo.21681-11

セーフティーアーム ウォーカーミニ

TAISコード 00465-000037



自重:2.7kg

レンタル価格	¥2,400
利用者負担 1割	
¥240	
2割	¥480
3割	¥720

コードNo.21681-32

〈オプションキャスター〉下記4タイプよりお選びください。

Cタイプ

コードNo.21681-36

TAISコード 00465-000025



自重:3.1kg



Mタイプ

コードNo.21681-33

TAISコード 00465-000039




自重:3.5kg



Lタイプ

コードNo.21681-35

TAISコード 00465-000017

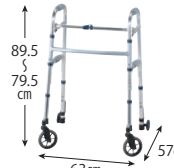


自重:3.8kg



Gタイプ

コードNo.21681-34

TAISコード 00465-000038

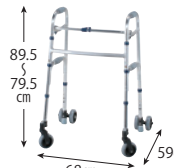

自重:4.8kg



特殊寝台・歩行器

床ずれ予防用品

手すり

歩行補助つえ

歩行器・歩行補助用品

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

住宅改修